

牙科用器械管理方法

1 消毒准备

将使用过的器械收集好
消毒液浸泡



2 手动清洗

用手或其他器械进行清洗



3 清水清洗

流水下进行2轮冲洗



4 干燥

充分进行干燥



5 消毒袋封装

将器械放入消毒袋密封



6 灭菌

放入消毒机进行灭菌



7 开封后使用

开封后使用，注意污染



【注意事项】

- 检查所有新器械的使用说明和消毒。除非有其他说明，否则所有器械在使用前都必须检查，清洁，冲洗和润滑。
- 清洁后使用水溶性器械润滑剂润滑。
- 遵守医院认可的清洁程序。
- 消毒液进行稀释后使用。
- 清洗要求消毒液无残留。
- 洗净后，充分干燥。
- 购买后的全新器械开封后，需用干燥的布擦拭后，灭菌使用。
- 如有腐蚀状态的器械，请勿与其他器械一起消毒灭菌。
- 如类似持针器闭合式器械，请充分暴露工作端消毒灭菌。

【处理】

外科手术器械无任何特殊分解或处理，因为他们不包含任何毒性或危害材料。

产品介绍

登腾外科手术工具盒



Dentium 登腾
For Dentists By Dentists

[2023-01]

韩国：76, Changnyong-daero 256beon-gil, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16229, Republic of Korea
 北京：顺义区林河经济开发区林河大街22号院13号楼5层501室
 上海：浦东新区周浦镇芙蓉花路500弄16号楼
 广州：海珠区沥滘路368号广州之窗商务港10楼1001室

T +82-31-888-5431
 T +86-10-8476-3053
 T +86-21-5878-6737
 T +86-20-6232-5588



Dentium 登腾
For Dentists By Dentists



序号/名称	型号	产品
01 注射器	D565	
02 S弯口角拉钩	830-021	
03 吸唾	820-013	
04 直圆刀柄	000-012	
05 直角刮匙	025-210	
06 剥离器-骨膜分离器	025-224	
07 双头3号骨刮匙	025-213	

序号/名称	型号	产品
08 刮治器	025-258	
09 探针	025-061	
10 Orban牙龈刀	025-259	
11 双面镀铍口镜	830-014	
12 双弯检查镊	100-018	
13 组织镊(15cm/TC)	160-075	
14 刻度刀柄	000-014	
15 巾钳	150-040	
16 弯镀银剪刀(16cm)	125-002	
17 止血钳(12cm)	150-002	
18 Glodfox剪刀(13cm/TC)	160-063	
19 持针器(15cm/TC)	160-034	
20 小碗	225-064	